



COMFORTEO Węglowski i Strykiewicz Sp. k.
Opatów, ul. Bolestawiecka 14a
63-645 Łęka Opatowska
POLSKA

INSTRUKCJA UŻYWANIA MATERACA MEDYCZNEGO

DARK

Wydano dnia 18.08.2025

Ważne informacje o produkcie

Przed przystąpieniem do użytkowania materaca proszę zapoznać się z zasadami prawidłowego użytkowania, co pozwoli na wydłużenie czasu eksploatacji, bez znaczącej utraty jego właściwości przedstawionych w ofercie Comforteo. Prawidłowe użytkowanie jest również podstawą do składania roszczeń przez klienta w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z brzmieniem Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 141, poz. 1176, z 2004 r. nr 96, poz. 959, z 2009 r. nr 115, poz. 960).

Materac medyczny Dark o wysokości 24 cm i zwiększonej twardości H5 łączy trwałość i elastyczność z wykorzystaniem naturalnych materiałów. Sercem tego modelu są pracujące niezależnie od siebie sprężyny kieszeniowe, które precyzyjnie dopasowują się do sylwetki i zapewniają prawidłowe ułożenie kręgosłupa bez względu na pozycję w trakcie snu. Stabilność konstrukcji wzmacnia podwójna mata kokosowa, która dodatkowo podnosi twardość materaca i wspiera jego higieniczne właściwości. Mata ta jest przewiewna i poprawia cyrkulację powietrza wewnątrz materaca, a naturalne włókna kokosowe pochłaniają nadmiar wilgoci. Z kolei zastosowany do ich łączenia lateks zapobiega rozwojowi pleśni, wspomagając utrzymanie odpowiednich warunków snu.

Model ten ubrany jest w pokrowiec Purotex+™, wykonany z dzianiny wykorzystującej innowacyjną technologię probiotyczną HeiQ Allergen Tech. Zastosowane w niej aktywne kultury bakterii zwalczają alergen pochodzący z roztoczy kurzu domowego oraz sierści zwierząt, zapewniając czyste i komfortowe środowisko snu. Pokrowiec Purotex+™ jest idealny dla osób z alergiami lub wrażliwą skórą, którym zależy na maksymalnej higienie, bo przyczynia się do minimalizowania reakcji alergicznych i podrażnień. W dodatku można go łatwo zdjąć i odświeżyć w warunkach domowych, a także wyprać w pralce w temperaturze do 40°C. Jego bezpieczeństwo gwarantują certyfikaty Allergy UK i OEKO-TEX.

Materac medyczny Dark to trwały i higieniczny model o zwiększonej twardości, idealny dla osób ceniących solidne podparcie. Niezależne sprężyny kieszeniowe dbają o prawidłowe ułożenie kręgosłupa, a podwójna mata kokosowa zapewnia lepszą wentylację i ogranicza rozwój wilgoci oraz pleśni. To doskonały wybór dla osób cierpiących na skoliozę, dyskopatię czy rwę kulszową, które szukają zdrowego, komfortowego i regenerującego wypoczynku.

Wkład materaca zawiera:

1. Mata kokosowa obustronnie
2. Filc obustronnie
3. Sprężyny kieszeniowe 7-polowe
4. Pianka poliuretanowa (X-Foam) obustronnie

Pokrowiec materaca zawiera:

1. Dzianina PES
2. Owata
3. Flizelina

ZASADY PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA MATERACY

1. Przed włożeniem materaca w ramę łóżka należy sprawdzić, czy stelaż jest właściwie podparty i wypoziomowany. Niewłaściwe wypoziomowanie stelaża może skutkować uszkodzeniem materaca.
2. Regularne odwracanie materaca średnio co 3 miesiące w płaszczyźnie wertykalnej i horyzontalnej.
3. Użytkowanie materaca na odpowiednio dobranym stelażu zgodnie z sugestiami oferty. Materace nie należy stosować na stelażach o nieprawidłowym rozstawie listew (odbiegających od oferty producenta), stelażach siatkowo-sprężynowych, z desek itd.
4. Stelaże posiadające listwę środkową powinny być podparte zarówno na swych długich bokach, jak i na środku.
5. Materaca nie należy kłaść na powierzchniach takich, jak podłoga lub płyta, a także przechowywać w pomieszczeniach wilgotnych, gdyż może to spowodować ich zapleśnienie.
6. Materace i stelaże powinny być odpowiednio dobrane dla klienta pod kątem jego wagi na etapie zakupu zgodnie z sugestiami producenta zawartymi w materiałach promocyjnych lub zgodnie z zaleceniami konsultanta Comforteo.
7. Na materacu nie powinno się skakać, stawać lub umieszczać ciężkich przedmiotów, gdyż może to prowadzić do jego zniszczenia.
8. Materaca sprężynowego nie należy zginać ani „łamać” np. w trakcie jego transportowania. Jedynym, bezpiecznym sposobem zginania materaca jest metoda „vacuum” stosowana przez producenta.
9. Pokrowiec przeznaczony do prania (posiadający wszyty zamek rozdzielczy) należy prać zgodnie z zaleceniami znajdującymi się na wszywce, tj.
 - a. Nie czyścić chemicznie
 - b. Nie suszyć w suszarce
 - c. Nie prasować
 - d. Nie wyżywać
 - e. Prać w temperaturze do 60 st. C
10. W przypadku wystąpienia niezgodności z umową w zakupionym materacu, stelażu lub pokrowcu nie należy naprawiać samodzielnie.

Materac nie może być dalej użytkowany, gdy:

- materac uległ deformacji na powierzchni spania o odkształceniu większym niż 20 mm;
- pokrowiec uległ rozdarciu i widoczna jest owata;
- pianka uległa rozdarciu;
- uszkodzona sprężyna przebiła powierzchnię materaca w którymkolwiek miejscu.

W przypadku podejrzenia, że użytkowanie materaca spowodowało pogorszenia się stanu zdrowia, należy skontaktować z pracownikiem służby zdrowia

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

Legenda symboli



Wyrób medyczny



Znak CE



Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją używania



Data produkcji



Nazwa i adres producenta



Chronić przed wilgocią



Kod UDI



Numer Seryjny produktu