



COMFORTEO Węglowski i Strykiewicz Sp. k.
Opatów, ul. Bolesławiecka 14a
63-645 Łęka Opatowska
POLSKA

INSTRUKCJA UŻYWANIA MATERACA MEDYCZNEGO

ENERGY

Wydano dnia 18.08.2025

Ważne informacje o produkcie

Przed przystąpieniem do użytkowania materaca proszę zapoznać się z zasadami prawidłowego użytkowania, co pozwoli na wydłużenie czasu eksploatacji, bez znaczącej utraty jego właściwości przedstawionych w ofercie Comforteo. Prawidłowe użytkowanie jest również podstawą do składania roszczeń przez klienta w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z brzmieniem Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 141, poz. 1176, z 2004 r. nr 96, poz. 959, z 2009 r. nr 115, poz. 960).

Materac medyczny Energy o twardości H3/H4 i wysokości aż 25 cm to innowacyjne połączenie twardości i komfortu. Rdzeń materaca stanowią niezależne od siebie sprężyny kieszeniowe typu multipocket, które zapewniają precyzyjne dopasowanie do ciała i niemal dwa razy więcej punktów podparcia niż standardowe modele kieszeniowe. Oprócz tego dzielą one powierzchnię materaca na 7 stref twardości, dzięki czemu ergonomicznie i stabilnie podpierają każdą partię ciała, minimalizując ucisk bez względu na pozycję w trakcie snu. Wnętrza materaca wzbogacają zaawansowane pianki: Pneumatic i HR. Pianka Pneumatic reaguje na ciepło ciała, otulając je i dokładnie dopasowując się do jego kształtów. Z kolei pianka wysokoelastyczna po pierwsze zapewnia elastyczność, a po drugie umożliwia swobodny przepływ powietrza, co pomaga w odprowadzaniu wilgoci i ciepła.

Model ten został zamknięty w pokrowcu Tencel, wykonanym z naturalnych włókien celulozy. Wyróżnia się on doskonałą oddychalnością i efektywnym usuwaniem wilgoci, co sprzyja świeżości oraz wspiera higieniczne, antyalergiczne środowisko snu. Pokrowiec można łatwo utrzymać w czystości — nadaje się do prania w temperaturze do 60°C, a jego jakość i bezpieczeństwo potwierdza certyfikat OEKO-TEX.

Materac medyczny Energy to solidne wsparcie dla osób zmagających się z bólem kręgosłupa i napięciem mięśni. Dzięki precyzyjnemu dopasowaniu do sylwetki oraz ograniczeniu nacisku w newralgicznych punktach, zapewnia wysoki komfort i spokojny sen. Szczególnie polecany jest osobom cierpiącym na dolegliwości takie jak rwa kulszowa, dyskopatia czy skolioza — to idealny wybór dla tych, którzy poszukują skutecznych i sprawdzonych rozwiązań.

Wkład materaca zawiera:

1. Pianka poliuretanowa
2. Sprężyny kieszeniowe 7-polowe typu multipocket
3. Pianka wysokoelastyczna
4. Pianka Pneumatic
5. Filc obustronnie
6. Trykot

Pokrowiec materaca zawiera:

1. Dzianina PES
2. Owata
3. Flizelina
4. Taśma wentylacyjna

ZASADY PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA MATERACY

1. Przed włożeniem materaca w ramę łóżka należy sprawdzić, czy stelaż jest właściwie podparty i wypoziomowany. Niewłaściwe wypoziomowanie stelaża może skutkować uszkodzeniem materaca.
2. Regularne odwracanie materaca średnio co 3 miesiące w płaszczyźnie wertykalnej i horyzontalnej.
3. Użytkowanie materaca na odpowiednio dobranym stelażu zgodnie z sugestiami oferty. Materace nie należy stosować na stelażach o nieprawidłowym rozstawie listew (odbiegających od oferty producenta), stelażach siatkowo-sprężynowych, z desek itd.
4. Stelaże posiadające listwę środkową powinny być podparte zarówno na swych długich bokach, jak i na środku.
5. Materaca nie należy kłaść na powierzchniach takich, jak podłoga lub płyta, a także przechowywać w pomieszczeniach wilgotnych, gdyż może to spowodować ich zapleśnienie.
6. Materace i stelaże powinny być odpowiednio dobrane dla klienta pod kątem jego wagi na etapie zakupu zgodnie z sugestiami producenta zawartymi w materiałach promocyjnych lub zgodnie z zaleceniami konsultanta Comforteo.
7. Na materacu nie powinno się skakać, stawać lub umieszczać ciężkich przedmiotów, gdyż może to prowadzić do jego zniszczenia.
8. Materaca sprężynowego nie należy zginać ani „łamać” np. w trakcie jego transportowania. Jedynym, bezpiecznym sposobem zginania materaca jest metoda „vacuum” stosowana przez producenta.
9. Pokrowiec przeznaczony do prania (posiadający wszyty zamek rozdzielczy) należy prać zgodnie z zaleceniami znajdującymi się na wszywce, tj.
 - a. Nie czyścić chemicznie
 - b. Nie suszyć w suszarce
 - c. Nie prasować
 - d. Nie wyżywać
 - e. Prać w temperaturze do 60 st. C
10. W przypadku wystąpienia niezgodności z umową w zakupionym materacu, stelażu lub pokrowcu nie należy naprawiać samodzielnie.

Materac nie może być dalej użytkowany, gdy:

- materac uległ deformacji na powierzchni spania o odkształceniu większym niż 20 mm;
- pokrowiec uległ rozdarciu i widoczna jest owata;
- pianka uległa rozdarciu;
- uszkodzona sprężyna przebiła powierzchnię materaca w którymkolwiek miejscu.

W przypadku podejrzenia, że użytkowanie materaca spowodowało pogorszenia się stanu zdrowia, należy skontaktować z pracownikiem służby zdrowia

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

Legenda symboli



Wyrób medyczny



Znak CE



Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją używania



Data produkcji



Nazwa i adres producenta



Chronić przed wilgocią



Kod UDI



Numer Seryjny produktu