



COMFORTEO Węglowski i Strykiewicz Sp. k.  
Opatów, ul. Bolestawiecka 14a  
63-645 Łęka Opatowska  
POLSKA

## INSTRUKCJA UŻYWANIA MATERACA MEDYCZNEGO

### GLOW

Wydano dnia 18.08.2025

#### Ważne informacje o produkcie

Przed przystąpieniem do użytkowania materaca proszę zapoznać się z zasadami prawidłowego użytkowania, co pozwoli na wydłużenie czasu eksploatacji, bez znaczącej utraty jego właściwości przedstawionych w ofercie Comforte. Prawidłowe użytkowanie jest również podstawą do składania roszczeń przez klienta w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z brzmieniem Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 141, poz. 1176, z 2004 r. nr 96, poz. 959, z 2009 r. nr 115, poz. 960).

Materac medyczny Glow o twardości H3 stanowi połączenie trzech pianek, wysokoelastycznej, antybakteryjnej i poliuretanowej, gwarantując wyjątkowy komfort i stabilne podparcie. Powierzchnia materaca jest podzielona na 7 stref twardości, odpowiadających anatomicznej budowie sylwetki. Dzięki temu kręgosłup jest prawidłowo ułożony w każdej pozycji w trakcie snu. Budowa strefowa zapewnia też optymalne podparcie każdej części ciała. Zastosowana w tym modelu pianka wysokoelastyczna nie tylko gwarantuje sprężystość i precyzyjne dopasowanie, ale także wspiera cyrkulację powietrza, ułatwiając odprowadzanie wilgoci i nadmiaru ciepła. Prozdrowotne właściwości materaca medycznego Glow uzupełnia pianka antybakteryjna, która hamuje rozwój bakterii, grzybów i pleśni, zwiększając tym samym higienę snu.

Wszystko to zamknięte jest w pokrowcu Master, wykonanym z wytrzymałego materiału, którego przyjemna w dotyku powierzchnia zwiększa komfort snu. Pokrowiec można łatwo zdjąć i wyprać w pralce w temperaturze do 60°C, co zapewnia higienę i wygodę użytkowania. Jego jakość i bezpieczeństwo potwierdza certyfikat OEKO-TEX.

Materac medyczny Glow został stworzony z myślą o osobach zmagających się z bólem kręgosłupa i napięciem mięśniowym, które potrzebują stabilnego, a jednocześnie komfortowego podparcia. Połączenie trzech pianek zapewnia odpowiednią sprężystość, dopasowanie oraz higienę snu. Jest to idealne rozwiązanie dla osób borykających się z problemami takimi jak dyskopatia, skolioza czy rwa kulszowa, które oczekują maksymalnej wygody i jakości.

Wkład materaca zawiera:

1. Pianka wysokoelastyczna
2. Pianka wysokoelastyczna – antybakteryjna
3. Pianka poliuretanowa

Pokrowiec materaca zawiera:

1. Dzianina PES
2. Owata
3. Flizelina
4. Dzianina 3D Caro

#### **ZASADY PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA MATERACY**

1. Przed włożeniem materaca w ramę łóżka należy sprawdzić, czy stelaż jest właściwie podparty i wypoziomowany. Niewłaściwe wypoziomowanie stelaża może skutkować uszkodzeniem materaca.
2. Regularne odwracanie materaca średnio co 3 miesiące w płaszczyźnie wertykalnej i horyzontalnej.
3. Użytkowanie materaca na odpowiednio dobranym stelażu zgodnie z sugestiami oferty. Materacy nie należy stosować na stelażach o nieprawidłowym rozstawie listew (odbiegających od oferty producenta), stelażach siatkowo-sprężynowych, z desek itd.
4. Stelaże posiadające listwę środkową powinny być podparte zarówno na swych długich bokach, jak i na środku.
5. Materaca nie należy kłaść na powierzchniach takich, jak podłoga lub płyta, a także przechowywać w pomieszczeniach wilgotnych, gdyż może to spowodować ich zapleśnienie.
6. Materace i stelaże powinny być odpowiednio dobrane dla klienta pod kątem jego wagi na etapie zakupu zgodnie z sugestiami producenta zawartymi w materiałach promocyjnych lub zgodnie z zaleceniami konsultanta Comforteo.
7. Na materacu nie powinno się skakać, stawać lub umieszczać ciężkich przedmiotów, gdyż może to prowadzić do jego zniszczenia.
8. Materaca sprężynowego nie należy zginać ani „łamać” np. w trakcie jego transportowania. Jedynym, bezpiecznym sposobem zginania materaca jest metoda „vacuum” stosowana przez producenta.
9. Pokrowiec przeznaczony do prania (posiadający wszyty zamek rozdzielczy) należy prać zgodnie z zaleceniami znajdującymi się na wszywce, tj.
  - a. Nie czyścić chemicznie
  - b. Nie suszyć w suszarce
  - c. Nie prasować
  - d. Nie wyżywać
  - e. Prać w temperaturze do 60 st. C
10. W przypadku wystąpienia niezgodności z umową w zakupionym materacu, stelażu lub pokrowcu nie należy naprawiać samodzielnie.

Materac nie może być dalej użytkowany, gdy:

- materac uległ deformacji na powierzchni spania o odkształceniu większym niż 20 mm;
- pokrowiec uległ rozdarciu i widoczna jest owata;
- pianka uległa rozdarciu;
- uszkodzona sprężyna przebiła powierzchnię materaca w którymkolwiek miejscu.

W przypadku podejrzenia, że użytkowanie materaca spowodowało pogorszenia się stanu zdrowia, należy skontaktować z pracownikiem służby zdrowia

***Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.***

***Legenda symboli***



Wyrób medyczny



Znak CE



Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją używania



Data produkcji



Nazwa i adres producenta



Chronić przed wilgocią



Kod UDI



Numer Seryjny produktu